


Nima Kildyna

Kilformad sittdyna för framåtlutande sittställning



Kilform — hög bakkant, låg framkant

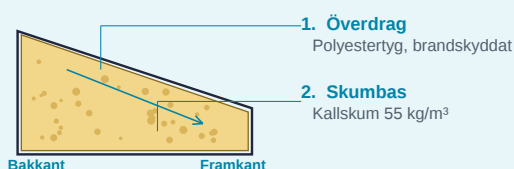

1. Överdrag

Polyestertyg, brandskyddat

2. Skumbas

Kallskum 55 kg/m³

Avsedd användning

Kilformad sittdyna avsedd att ge en **framåtlutande sittställning**. Hög bakkant och låg framkant ger en lätt framåtlutning av bäckenet.

Dynan finns med **olika lutning** beroende på brukarens behov.

Skummaterialet är lätt och mjukt. Dynan finns även i en version med **mjukt skum i centrum bakkant** för avlastning av svanskota.

Användarmiljö: stolar, fåtöljer och andra sittmöbler där framåtlutande sittposition önskas.

Användare: brukare själv eller vård-/anhörigpersonal efter behovsbedömning av legitimerad förskrivare.

Leverans: dynan levereras färdig att tas i bruk — kontrollera storlek och lutning vid montering.

Material: Dynbas av kallskum (densitet 55 kg/m³) i kilform. Brandskyddat överdrag av polyester.

Så använder du dynan

1. Ta ur dynan ur förpackningen.
2. Placera dynan enligt etiketteringen — **hög kant bakåt**, låg kant framåt.
3. Kontrollera **storlek och lutning** — välj annan modell om dynan inte passar behovet.
4. Dynan är klar att användas — inga justeringar behövs.

Rekonditionering & skötsel

Mellan brukare: avtorka dynbasen med desinfektion eller tvållösning. **Maskintvätta inte dynbasen.**

Torkning: plantorka basen i torkskåp eller fritt liggande.

Överdrag: maskintvätt 60 °C, tål torktumling.

Kassering: uttjänt dyna sorteras som brännbart.

Viktigt att tänka på

- Lutningen ska väljas efter brukarens behov — fel lutning kan ge instabilt sittande.
- Inspektera dynan och huden regelbundet.

Brukarvikt	Max 150 kg (samtliga storlekar)
Material	Kallskum 55 kg/m ³ · Brandskyddat polyesteröverdrag
Utförande	Kilform — finns med olika lutningar.
Storlekar	Sittbredd/sittdjup enligt artikelnummer (DKlIsbsd).
Vikt	0,6–1,0 kg beroende på storlek
Livslängd	Förväntad 5 år · Garanti 2 år

Tillbehör

- Standardöverdrag, polyester (*medföljer*)
- Inkontinensskyddat överdrag
- Inkontinensskyddad hätta med resår

CE

MD

i

Dynbas:



Överdrag:



Se sida 2 för symbolförklaring och full MDR-info.

Teknisk dokumentation och MDR-information

Kompletterande regulatorisk information enligt förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter (MDR). Avsedd användning, konstruktion, brukarvikt, tillbehör och skötsel framgår av sida 1.

Produktidentifiering och klassificering Artikelnummerformat: DKIsbsdshsh (där sb = sittbredd, sd = sittdjup i cm, sh bak, sh fram — t.ex. DK140408020).

ISO-kod: 18 10 06 — Kilformad sittdyna (ISO 9999).

Klassificering: Medicinteknisk produkt klass I enligt MDR (EU) 2017/745.

UDI-DI: Varje storlek har eget UDI-DI enligt GS1 (GTIN). Exempel: DK140408020 → GTIN 7333376015709.

Streckkod: EAN-13.

Steril/återanvändning: Icke-steril, återanvändbar mellan brukare efter rekonditionering enligt anvisning på sida 1.

Tester och standarder

Brandtestad enligt: ISO 7176-16 (antändlighetsegenskaper hos stoppade rullstolsdelar).

Symboler: Märkning enligt EN ISO 15223-1 (medicintekniska) och ISO 3758 (textilvård).

Kvalitetsledning: Tillverkning enligt ISO 13485.

Försäkran om överensstämmelse: Tillverkaren har upprättat EU-försäkran om överensstämmelse — kontakta Nimacare AB för aktuell version.

Restriktioner och kontraindikationer

- Brukare där framåtlutande sittställning är olämpligt — t.ex. vid vissa ryggdiagnoser eller balansproblem.
- Brukare med vikt över 150 kg.
- Användning på skadad dyna.

Förvaring, inspektion och miljö

- Inspektera dyna och överdrag regelbundet — skadad produkt får inte användas.
- Undvik användning nära öppen låga eller kraftig värmekälla.
- Förvara svalt och torrt.
- Dynbasen är inte vätsketät — använd inkontinensskyddat överdrag vid behov.

Anpassning

Dynan får **inte beskäras**. Vid behov av annan storlek eller lutning — välj annan modell ur sortimentet. Modifiering eller beskärning innebär att CE-märkningen upphör att gälla och att tillverkarens ansvar bortfaller.

Kvarstående risker

Kildynan ger en framåtlutande sittställning som inte passar alla brukare — **fel val av lutning eller felaktig orientering** kan ge instabilt sittande och risk för glidning. Kildynor är primärt avsedda för positionering och inte i första hand för tryckavlastning — vid förhöjd risk för trycksår välj kompletterande eller tryckfördelande dyna.

Rapportering av allvarliga tillbud

Allvarliga tillbud i samband med användning av produkten ska rapporteras till Nimacare AB (info@nimacare.se) samt till behörig myndighet i det medlemsland där användaren och/eller patienten är etablerad. I Sverige rapporteras tillbud till **Läkemedelsverket** (www.lakemedelsverket.se).

Tillverkare och regulatorisk kontakt

Nimacare AB

Sigurdvägen 4, 18254 Djursholm, Sverige

SRN (EUDAMED): SE-MF-000050989

Tel: +46 (0)70 635 50 70 · E-post: info@nimacare.se · Webb:

www.nimacare.se

Person ansvarig för regulatorisk efterlevnad (PRRC) enligt MDR Art. 15 — kontakta info@nimacare.se.

Symbolförklaring

Medicintekniska symboler enligt EN ISO 15223-1. Tvätt- och skötselsymboler enligt ISO 3758.



Medicinteknisk produkt



Läs bruksanvisningen



Avtorkning — endast dynbas, ej maskintvätt



Plantorka — dynbas torkas plant



CE-märkning — uppfyller MDR (EU) 2017/745



Tillverkare



Maskintvätt 60 °C — endast överdrag



Torktumling tillåten — överdrag, normal temperatur

Dokumentinformation: Detta produktblad utgör både produktinformation och bruksanvisning i pappersform enligt MDR (EU) 2017/745, Bilaga I, avsnitt 23. Senaste revision: **2026-05-21**. Dokument-ID: NIMA-DKI-IFU-Rev2026-05-21. Vid avvikelse mellan denna version och senare publicerad version på www.nimacare.se gäller den senare. Produkten är märkt med UDI-DI på etikett — kontrollera att UDI på etiketten matchar leveransen.